

ConvaMax™ SUPERABSORBER

NOWOŚĆ

KONTROLA WYSIĘKU. OCHRONA SKÓRY.¹



OPATRUNEK Z SUPERABSORBENTEM
PRZYLEPNY LUB NIEPRZYLEPNY



ELASTYCZNOŚĆ



MIĘKKOŚĆ



WYSOKA CHŁONNOŚĆ



WYSOKI STOPIEŃ
ZATRZYMYWANIA
PŁYNÓW


Opatrunek ConvaMax™
Superabsorber efektywnie
kontroluje poziom wysięku,
aby utrzymać skórę w dobrej
kondycji i wspomóc gojenie¹



 **ConvaTec**

Wyzwania związane z nadmiarem wysięku


Aby rana mogła się zagoić, musi wydzielać wysięk. Wysięk zapobiega wysychaniu łożyska rany, wspomaga migrację komórek odbudowujących tkankę, dostarcza niezbędnych składników odżywczych dla metabolizmu komórek i pomaga w oddzieleniu martwej lub uszkodzonej tkanki.¹⁻³

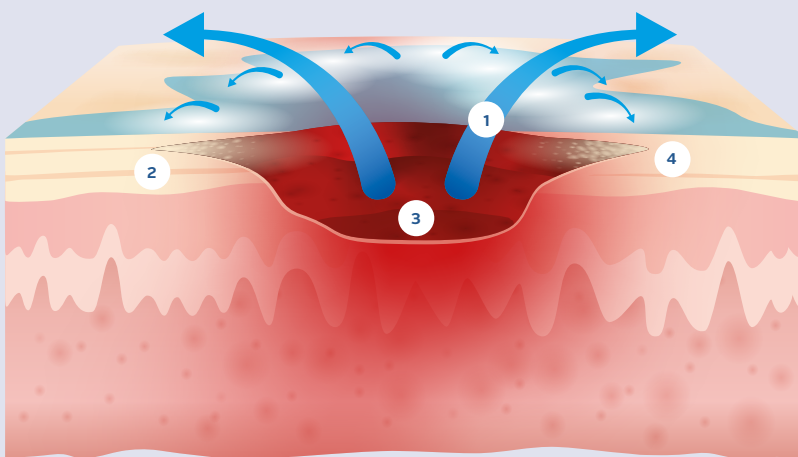

1. Wysięk
2. Naskórek
3. Obszar rany
4. Obszar związany z uszkodzeniem przez wysięk tkanki wokół rany

Jednak nadmiar wysięku z rany może powodować różne problemy zdrowotne okolicy rany i otaczającej ją skóry.

Nadmiar wysięku może zagrażać integralności skóry i opóźniać lub uniemożliwiać gojenie się rany.

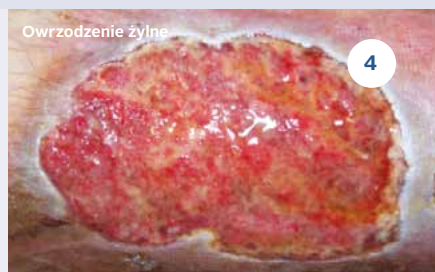

Zdjęcia za zgodą ich właścicieli



Problemy klinicystów:³

- Maceracja i niszczenie skóry wokół rany
- Przesiśkanie wysięku, co powoduje zwiększone ryzyko infekcji
- Częste wizyty pacjenta i zmiany opatrunków, co zwiększa nakład pracy i koszty opatrunków
- Rana staje się statyczna z powodu nieefektywnej kontroli wysięku



Problemy pacjenta:³

- Przepiękanie i zabrudzenie odzieży lub pościeli, powodujące dyskomfort i niewygodę
- Nieprzyjemny zapach
- Efekty psychospołeczne, takie jak zakłopotanie, wstyd lub obawa związana z raną
- Spadanie opatrunków z powodu nasycenia wysiękiem
- Ból przy zakładaniu lub zdejmowaniu opatrunku

Odkryj opatrunek, odpowiadający wyzwaniu

Stworzenie optymalnego środowiska gojenia się rany wymaga opatrunku, który może chronić przed uszkodzeniami spowodowanymi nadmiarem wysięku i pomagać w utrzymaniu integralności skóry.

Rozwiązanie dla nadmiaru wysięku: opatrunek ConvaMax™

ConvaTec™ to ponad 25 lat doświadczenia w dziedzinie leczenia ran, a nasze produkty cieszą się zaufaniem specjalistów na całym świecie.



Wysoki poziom absorpcji, nawet pod uciskiem*

Wysięk z ran przewlekłych może być destrukcyjny dla łóżyska rany i nienaruszonej skóry. Opatrunek ConvaMax™ wchłania obfity wysięk do rdzenia superabsorbentu (SAP) (do 177g/100cm²), zamykając i utrzymując go z dala od rany, co pomaga zachować integralność skóry.



Wysoki stopień zatrzymywania płynów i bakterii*

Opatrunek ConvaMax™ zatrzymuje wchłonięty raz wysięk w rdzeniu SAP, co zapewnia, że nie zostanie on uwolniony z powrotem do rany, bandaży lub ubrania.



Modulacja proteaz[†] (MMP)

Udowodniono w badaniach *in vitro*, że opatrunek ConvaMax™ nie tylko absorbuje MMP, ale również wiąże je. Dzięki temu redukuje nadmiar MMP w środowisku rany, co sprzyja gojeniu.



Miękki i elastyczny*


Jest miękki, łatwy do założenia i usunięcia co wpływa na zadowolenie pacjenta. Niebieska warstwa ochronna zapobiega przesiąkaniu i zachowuje elastyczność.

Wybór opatrunku, który skutecznie kontroluje poziom wysięku z rany, może skutkować wydłużeniem czasu noszenia, przekładając się na pozytywny wpływ na koszty, a także może pomóc w gojeniu się rany.³



Wybór odpowiedni dla każdej rany*

Wybór pełnej gamy rozmiarów do każdego rodzaju rany, w wersji przylepnej lub nieprzylepnej.

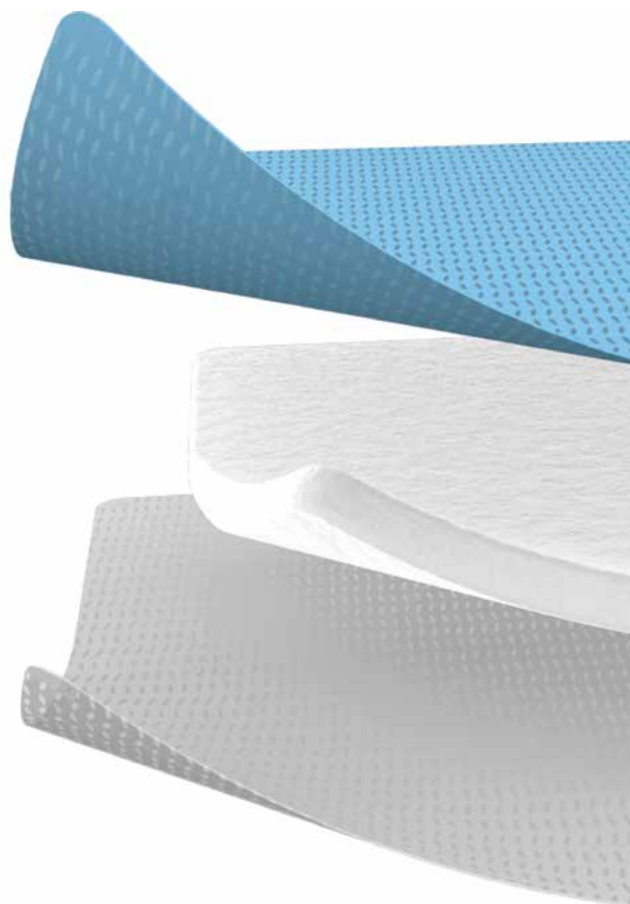


*In-Vitro Performance Characteristics of ConvaMax™, WHRI6045 MS161, Data on file, ConvaTec.


Stosowany z opatrunkami w technologii Hydrofiber®, zapewnia dodatkową ochronę.

Opatrunek ConvaMax™ może być stosowany jako pierwotny lub wtórny. Jako wtórny, jest kompatybilny z opatrunkami w technologii Hydrofiber®, takimi jak AQUACEL® EXTRA™ czy AQUACEL® Ag+ EXTRA™. Wysiłek może być przenoszony przez warstwę Hydrofiber® i zostać wchłonięty przez opatrunek ConvaMax™, zapewniając połączenie zaawansowanej warstwy kontaktowej z raną i wysokiej zdolności absorpcyjnej.


In-Vitro Performance Characteristics of ConvaMax™, WHRI6045 MS161, Data on file, ConvaTec.

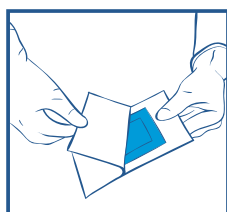

Po oczyszczeniu rany należy zastosować odpowiedni rozmiar opatrunku ConvaMax™ Superabsorber, dobrane tak, aby zachodził na brzegi rany.

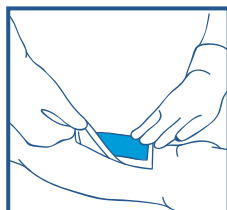

Opatrunek ConvaMax™ Superabsorber w wersji nieprzylepnej lub przylepnej mogą być stosowane jako opatrunek pierwotny lub wtórny. Gdy stosowane są jako opatrunek pierwotny, muszą być w ścisłym kontakcie z łóżyskiem rany, aby zapewnić wchłanianie wysięku z rany. Opatrunek należy zakładać białą warstwą kontaktową na ranę, niebieska, wodoodporna warstwa zewnętrzna powinna znajdować się na górze.

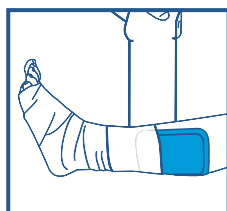

Zabezpiecz opatrunek ConvaMax™ Superabsorber bandażem, taśmami lub bandażem kompresyjnym, jeśli klinicznie wskazane.

Rozmiar opatrunku	Ilość w opakowaniu	Kod produktu
ConvaMax™ Superabsorber Nieprzylepny		
10cm x 10cm	10	422567
10cm x 20cm	10	422568
15cm x 15cm	10	422570
20cm x 20cm	10	422572
20cm x 30cm	10	422573
20cm x 40cm	10	422574

ConvaMax™ Superabsorber Przylepny		
10cm x 10cm	10	422576
15cm x 15cm	10	422579
20cm x 20cm	10	422581

1. World Union of Wound Healing Societies (2019) Consensus Document. Wound exudate: effective assessment and management Wounds International. Available at: www.woundsinternational.com 2. Cutting KF, White R (2002) Maceration of the skin and wound bed: its nature and causes. J Wound Care 11(7): 275–8 3. World Union of Wound Healing Societies (2007) Principles of best practice: wound exudate and the role of dressings. A consensus document. London: MEP Ltd. Available at: www.woundsinternational.com

Aby dowiedzieć się więcej lub poprosić o wizytę przedstawiciela, zadzwoń na numer:

608 698 043

www.convatec.pl, dzial.pomocy@convatec.com



AWC/01/01/2022

ConvaMax™, AQUACEL® i Hydrofiber® są znakami towarowymi ConvaTec Inc. Wszystkie znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.
©2019 ConvaTec Inc. AP-020389-MM